



Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Händedesinfektionsgel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

## desderman® pure gel

### Unser Plus

- getestet nach den Euronormen EN 1500 und EN 12 791
- zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion
- farbstoff- und parfümfrei, daher auch für Allergiker geeignet
- das Plus für Hautschutz und -pflege durch bewährtes Rückfettersystem
- erfüllt die klinischen Wirksamkeitsstandards der FDA (TFM)

### Anwendungsgebiete

- hygienische Händedesinfektion
- chirurgische Händedesinfektion

### Anwendungshinweise

desderman® pure gel wird unverdünnt angewendet. Während der Einwirkzeit bei der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sollte die portionierte Gabe von desderman® pure gel so erfolgen, dass die Hände während der gesamten Applikationszeit gut angefeuchtet bleiben.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid	gebrauchsfertig	30 Sek.
MRSA	gebrauchsfertig	30 Sek.
tuberkulozid	gebrauchsfertig	30 Sek.
levurozid	gebrauchsfertig	15 Sek.
begrenzt viruzid	gebrauchsfertig	30 Sek.
Vaccinia Virus	gebrauchsfertig	30 Sek.
begrenzt viruzid PLUS	gebrauchsfertig	2 Min.
viruzid	gebrauchsfertig	2 Min.
Adenovirus	gebrauchsfertig	2 Min.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
Norovirus	gebrauchsfertig	15 Sek.
Poliovirus	gebrauchsfertig	90 Sek.
Rotavirus	gebrauchsfertig	15 Sek.

Anwendungsgebiet	Konzentration	Einwirkzeit
Chirurgische Händedesinfektion EN12791	gebrauchsfertig	90 Sek.
Hygienische Händedesinfektion EN1500	gebrauchsfertig	30 Sek.

### Listungen

- VAH-Zertifikat
- ÖGHMP-Zertifikat



# desderman<sup>®</sup> pure gel

## Produktdaten

Zusammensetzung:  
100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe 78,2 g Ethanol 96  
%, 0,1 g Biphenyl-2-ol

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,83 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	13 °C / Methode: DIN 53213, Teil 1
Form	viskos
pH	Nicht anwendbar
Viskosität, dynamisch	700 - 1.300 mPa*s / 20 °C / Methode: DIN 53019

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com). Für individuelle Fragen:  
Customer Sales Service Telefon: +49 40 52100-666  
E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

## Besondere Hinweise

Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten Heizquellen bringen. Die Haltbarkeit im geöffneten Originalgebinde entspricht der Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde. Nach Anbruch beträgt die Haltbarkeit im SM2-Spender 12 Monate sowie im KH-Wandspender 6 Monate. Nicht über das Verfallsdatum hinaus anwenden! Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
desderman pure gel INT 100 ml FL	30/Karton	126908
desderman pure gel 500 ml FL	20/Karton	126902
desderman pure gel 1 l FL	10/Karton	126903
desderman pure gel -INT- 1 l EF	10/Karton	126913

## Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Dosierpumpe 1l-Eurofl.	180803
Dosierpumpe für 500 ml / 1 L	180303
Kanisterschlüssel für 5/10 l Kanister	135810
Präp.spender KHK 1000, gerade Edelstahlpumpe	701413
Präp.spender KHK 500, gerade Edelstahlpumpe	701414
Präp.spender KHL 1000, gerade Edelstahlpumpe	701415
Präp.spender KHL 500, gerade Edelstahlpumpe	701416
Präp.spender schülke touchless D1	668315
Präparate-Spender SM2 500	668600
Präparate-Spender SM2 Universal	668500

## Verwandte Produkte

- desderman<sup>®</sup> pure
- desmanol<sup>®</sup> pure



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer  
Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-  
Zertifikaten für Arzneimittel.

**schülke Österreich**  
Schülke & Mayr GmbH  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Österreich  
Tel. +43 (1) 523 25 01  
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60  
[www.schuelke.at](http://www.schuelke.at)  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)